


Pavaddokumentācijas aizpildīšana

1.

Pirms paraugu noņemšanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, lai paraugu noņemšanas brīdī viss ir skaidrs un pārlicinieties, ka paraugu noņemšanas komplekts satur visu nepieciešamo;

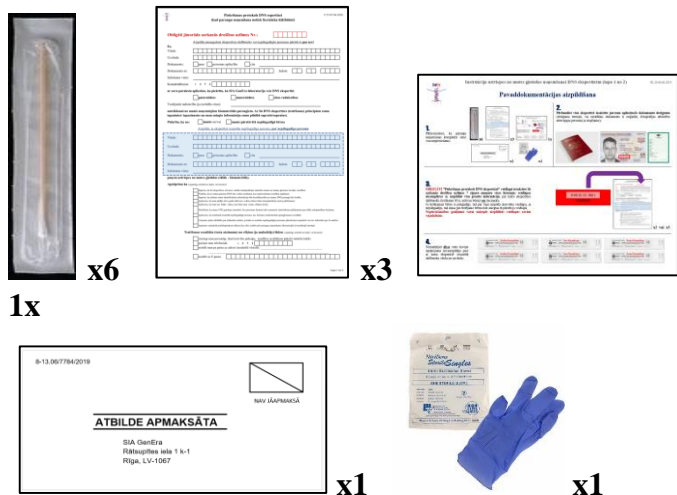

2.

Pārbaudiet visu ekspertīzē iesaistīto personu apliecinošo dokumentu derīgumu (derīguma termiņš, vai uzrādītais dokuments ir oriģināls, fotogrāfijas atbilstību attiecīgajai personai ja iespējams);




3.

OBLIGĀTI "Piekrišanas protokols DNS ekspertīzei" veidlapā ierakstiet šīs sarkanās drošības uzlīmes 7 ciparu numuru visos lietotajos veidlapas eksemplāros un aizpildiet visu prasīto informāciju (vēlams drukātiem burtiem), par katru ekspertīzes dalībnieku (testējamo tēvu, māti un bērnu) un liecinieku.

Ja testējamais bērns ir pilngadīgs, tad par viņu aizpilda atsevišķu veidlapu, ja nepilngadīgs, tad ziņas par testējamo bērnu tiek sniegtas tā pārstāvja veidlapā.

Nepieciešamības gadījumā varat nokopēt aizpildītās veidlapas savām vajadzībām.

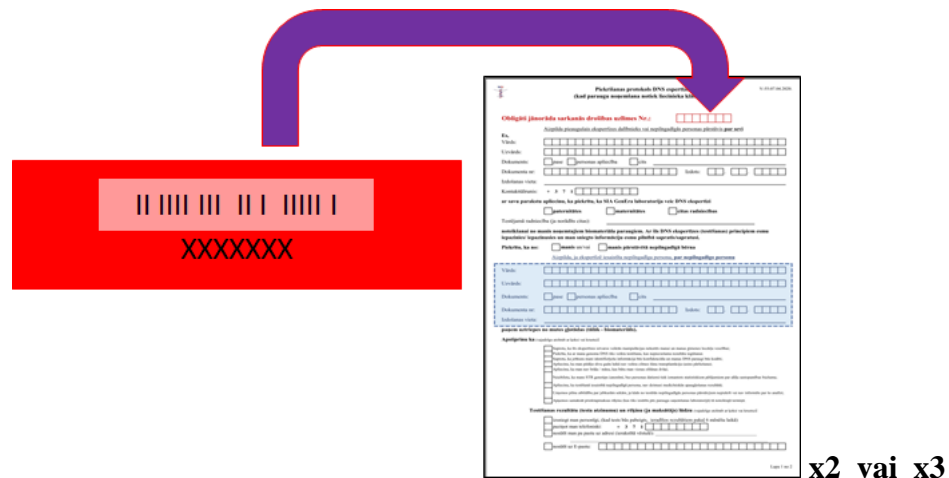

4.

Nomarkējiet divu vates kociņu iepakojumu necaurspīdīgo pusi ar katra ekspertīzē iesaistītā dalībnieka vārdu un uzvārdu;



Paraugu noņemšana


SVARĪGI!!!

NEVEICIET parauga noņemšanu tūlīt pēc zobu mazgāšanas, ēšanas (īpaši zīdaiņiem) vai smēķēšanas (nogaidiet vismaz vienu stundu).

5.

Personai, kas veic paraugu noņemšanu jālieto iepriekš nelietoti vienreizējās lietošanas gumijas cimdi, kas atrodas šajā paraugu noņemšanas komplektā.

Pēc iespējas nesabojājot iepakojumu, atver to iepakojuma galu, kurā nav vates tampona, pieskartiēs drīkst tikai kociņa galam, uz kura nav vates, uzmanīgi izņem vates kociņu no iepakojuma;

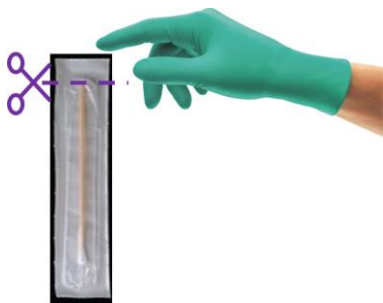

6.

Intensīvi paberzējiet un rotējiet vates kociņu pa vaiga iekšpusi apmēram **15 sekundes**;




7.

Nekavējoties, pēc parauga noņemšanas, lieciet vates kociņu **atpakaļ tā oriģinālajā iepakojumā ar galu, uz kura ir paraugs, vērstu uz leju – iepakojuma apakšdaļā.**

Uzmanīgi, pārlicinieties, ka noņemtais paraugs atbilst tai personai, kuras identificējošais marķējums ir uz vates kociņa iepakojuma (skat. 4. punktu).

Atkārtojiet parauga noņemšanas soļus ar otru vates kociņu un veiciet šīs pašas darbības pārējiem ekspertīzes dalībniekiem (katram ekspertīzes dalībniekam jābūt noņemtiem diviem paraugiem);

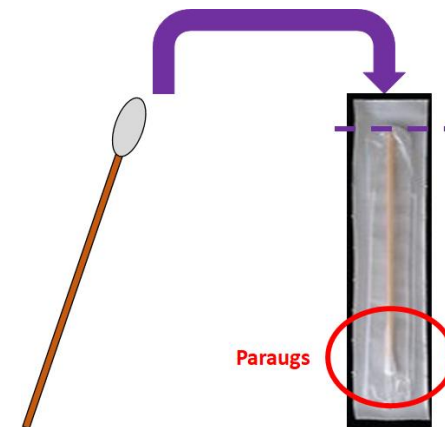


8.

Ievietojiet iepakojumus, kas satur vates kociņus ar paraugu, sūtīšanas aploksnē kopā aizpildīto veidlapu oriģināliem un **aizlīmējiet to**;



9.

Uzlīmējiet uz jau aizlīmētas atpakaļsūtīšanas aploksnēs sarkano drošības uzlīmi (skat. 3. punktu) tā, lai tā pārklāj aploksnēs aizlīmējuma vietu;

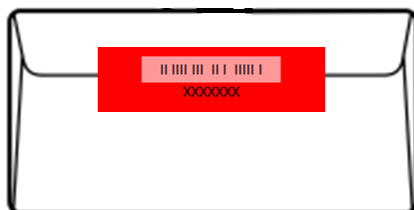

10.

Nelietojot pastmarkas, iemetiet aploksnī tuvākajā “Latvijas pasts” pasta kastē vai citā veidā nogādācijā to SIA GenEra laboratorijā.

